

YAM

牛用スリットガイド

移植用器具をより衛生的に牛腔内へ挿入する際のスリット入りガイドです。

軽量設計

本体重量はわずか20g。
非常に軽いため作業時の負担を軽減します。

透明素材を採用

透明性の高いポリカーボネート素材を使用。
スムーズな操作をサポートします。

洗浄しやすい構造

スリットにより内部の洗浄作業が
容易に行えます。

簡単操作

スリット構造により移植器のみを体内に
残したまま本製品を簡単に取り外せます。



使用イメージ

使用方法

STEP 1	牛の陰部に本器具を挿入	
STEP 2	本器具の内側を通して受精卵移植器を挿入	
STEP 3	スリットを利用し器具だけを取り外す	
STEP 4	受精卵移植を実施	

製品情報 単位(mm)

コード番号	01220000	全長	176
品名	YAM 牛用スリットガイド	外径(フレアー部)	Φ33
材質	ポリカーボネート製	スリット幅	14
外観	クリア(透明色)	挿入部:長さ	165
内容量	1本/袋	挿入部:外径	Φ22
重さ	20g	挿入部:内径	Φ19

富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号
TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663
URL <http://www.fujihira.co.jp>

FHK

北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406
帯広支店 〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号
TEL(0155)58-1811(代) FAX(0155)58-1815